



Bedienungsanleitung

TRAGENLAGERUNG **EASY-FLEX**

DIN EN 1789 / CE

KURZBESCHREIBUNG

Gesamtgewicht: ca. 60 kg (je nach Tragenrückhaltesystem)

Varianten

Die Tragenlagerung gibt es in zwei Varianten

- hohe Variante (350 mm hoch)
für Fahrzeuge mit niedriger Beladehöhe
Fahrzeughöhe bis 590 mm
(z. B. VW T5, MB Vito etc.)
- niedrige Variante (260 mm hoch)
für Fahrzeuge mit hoher Beladehöhe
Fahrzeughöhe von 590 mm bis 650 mm
(z. B. MB Sprinter, Ford, Peugeot etc.)

Beschreibung

Die Tragenlagerung Easy-Flex ist nach den Richtlinien der DIN EN 1789 mit Rückhaltesystem Stollenwerk/PB MeTech und der Fahrtrage der Firma Stollenwerk geprüft.

Die Tragenlagerung Easy-Flex ist für alle gängigen Fahrtragen der Hersteller Stollenwerk, Ferno usw. geeignet. Sonderfahrtragen müssen speziell angepasst werden.

In Verbindung mit einer Beladeklappe ist die Funktion der Ausfallsicherung nicht möglich.

Das Lochbild der Bodenbefestigung an der Tragenlagerung ist auch für Airline-Schienen lieferbar. Dies ermöglicht das schnelle Entnehmen der Tragenlagerung aus dem Fahrzeug bei Nichtgebrauch.

Die komplette Tragenlagerung ist aus nichtrostendem Stahl gefertigt, was eine lange Lebensdauer bedeutet und zusätzlich für Desinfektionsmaßnahmen bestens geeignet ist.

Die Linearführung der Tragenlagerung Easy-Flex erfolgt mit zwei Kunststoff-Halbschalen (Rollen), die ein Edelstahlrohr $\varnothing 42,5$ mm komplett umschließen. Somit ist ein Herauspringen des Oberteils unmöglich.

BE- UND ENTLADEN

Das Tischoberteil wird mittels eines **Drehgriffes** (siehe Foto) am Fußende im Uhrzeigersinn entriegelt und danach nach hinten herausgezogen. Der **Drehgriff** muss während des Vorganges losgelassen werden, um das Einrasten der Bolzen im ausgefahrenen Zustand zu ermöglichen.

Jetzt kann die Fahrtrage entriegelt und mit dem Patienten ausgefahren werden.

Beim An- bzw. Einfahren mit der Fahrtrage ist unbedingt darauf zu achten, dass die Arretierbolzen eingerastet sind, da ansonsten das Oberteil mit der Fahrtrage gleichzeitig eingeschoben wird (**Achtung Unfallgefahr!**).



Drehgriff

SERVICE UND GEWÄHRLEISTUNG

Ersatzteile

Die für die Reparatur benötigten Ersatzteile werden nach den jeweils gültigen Preislisten berechnet. Es gelten grundsätzlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma PB MeTech GmbH, die online abrufbar sind (www.pbmetech-gmbh.de).

Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit für unsere Produkte beträgt **1 Jahr**. Diese beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Für eine Verlängerung der Gewährleistung um ein weiteres Jahr setzen wir eine Wartung nach Ablauf eines Jahres voraus. Die Wartung muss durch eine geschulte bzw. durch PB MeTech GmbH autorisierte Person durchgeführt werden.

Die Kosten der Wartung werden vom Kunden übernommen.

Sollten Ersatzteile im Rahmen der Gewährleistung ausgetauscht werden müssen, erhalten Sie diese kostenlos.

Kontaktieren Sie uns, um unseren Service nutzen zu können.

PB MeTech GmbH
Brühlweg 19
73553 Alfdorf

E-Mail: service@pbmetech-gmbh.de | **Telefon:** +49 7172 18991-0

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

1. Die Verwendung der **Tragenlagerung Easy-Flex** ist ausschließlich zum Einbau für die im Rettungsdienst und Krankentransport eingesetzten Fahrzeuge bestimmt.
2. Die **Tragenlagerung Easy-Flex** ist für den Transport von Personen ausgelegt.
3. Insbesondere ist es verboten, die **Tragenlagerung Easy-Flex** zu verändern und sie anderen Verwendungen zu erschließen.
4. Der Verwender hat die Verpflichtung, die Angaben zu Betrieb, Wartung und Instandhaltung zu beachten.
5. Um Gefahren zu vermeiden, ist der Verwender verpflichtet, vorhersehbarem Missbrauch vorzubeugen.

Für hieraus entstehende Schäden haftet die Firma PB MeTech GmbH nicht.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch

- das Beachten aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung
- die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten.

URHEBERRECHT

Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt bei der Firma **PB MeTech GmbH**.

Diese Bedienungsanleitung ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt.

Sie enthält Vorschriften und Hinweise, die **weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder anderweitig mitgeteilt werden dürfen**.

Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Änderungen, die zu Verbesserungen der Bedienung und der Technik dienen, behalten wir uns vor.



PB MeTech GmbH

Brühlweg 19
73553 Alfdorf

Telefon +49 7172 18991-0
Fax +49 7172 18991-70

info@pbmetech-gmbh.de
www.pbmetech-gmbh.de